

Инструкция по применению и уходу за техническим средством реабилитации «Эпитез пальца».


МПЦ «Эпитетика»

В данной инструкции представлены рекомендации по уходу за эпитезом=протезом пальца. Следуя рекомендациям, Вы сможете получить максимальную пользу от его применения и продлить срок службы изделия.

Мы обеспечиваем высокое качество изготовления эпитезов=протезов пальцев:

- изготовление эпитеза осуществляется по индивидуальной модели из высокотехнологичных силиконовых материалов, которые хорошо переносят воздействие внешних факторов окружающей среды и обладают прекрасным эстетическим видом;
- в присутствии пациента эпитез окрашивается в оттенки максимально близкие к тону его кожного покрова; протезу придается естественный вид: прорисовывается кожный рисунок (пятнышки, линии сгиба и др.);
- с учетом формы ногтей и пожеланий пациента индивидуально изготавливается ногтевая пластина и осуществляется окрашивание ногтевого ложа;
- в эпитезе используется акриловый ноготь, что особенно важно для женщин, так как в дальнейшем на нем можно делать маникюр. Также возможно изготовление эпитеза пальца, адаптированного под накладные ногти;
- индивидуальный эпитез частично помогает восстановить удерживающую функцию;
- эпитез пальца обеспечивает косметический эффект, уменьшает степень и выраженность дефекта;
- служит хорошей защитой для поврежденных тканей от внешних физических факторов.

Эпитез выдается в упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды.

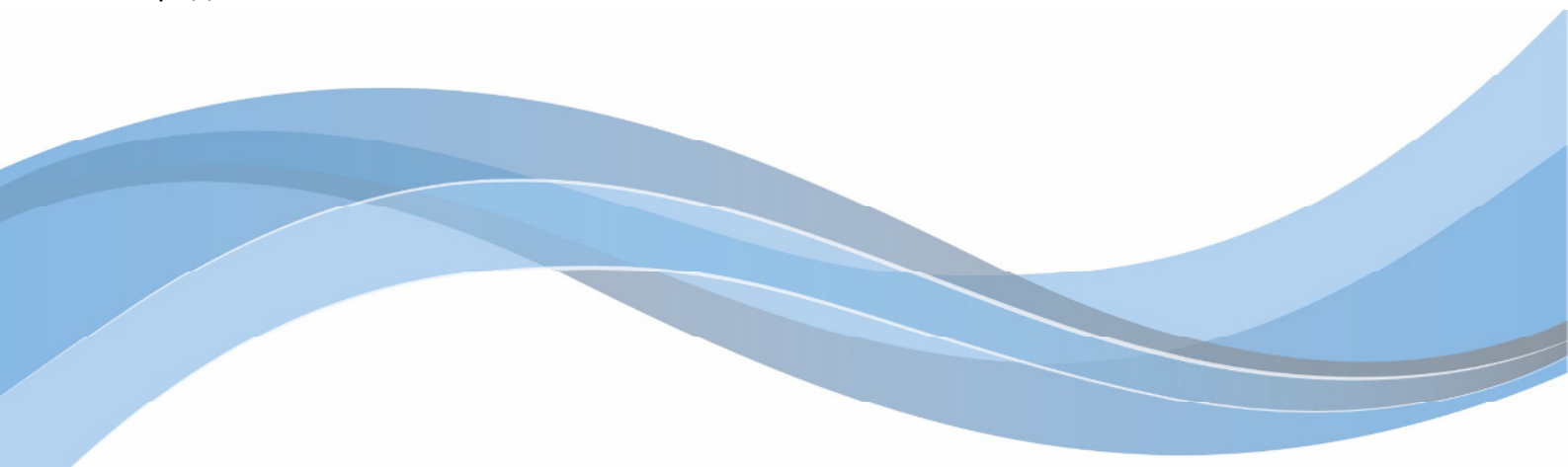

Способы крепления эпитеза=протеза пальца:

- Вакуумный (эффект «присоски»);
- Клеевая фиксация.

Для фиксации и сокрытия места крепления эпитеза=протеза пальца используются декоративные элементы (кольца, ювелирные изделия и др.)

Уход за эпитезом=протезом пальца:

Протез пальца рекомендуется снимать каждые 6 часов. Изделие следует очищать после каждого использования, промывать его теплой водой с мылом. Лучше применять детское жидкое мыло без отдушек; сразу после мытья протез нужно промокнуть чистой сухой салфеткой.

Эпитез можно носить при повседневной жизнедеятельности человека. Храните эпитез=протез в чистом сухом вентилируемом месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей.

Избегайте воздействия высоких температур. На время сна эпитез рекомендуется снимать.

